

# GENETICO

## Instrukcja pobierania materiału do badań genetycznych



### ZAWARTOŚĆ PAKIETU




1. Pałeczka wymazowa w opakowaniu foliowym
2. Zielona koperta papierowo-foliowa ze środkiem osuszającym i oznaczeniem na tyle osoby od której pochodzi próbka
3. Rękawiczki jednorazowe
4. Koperta depozytowa
  - Koperta zwrotna z adresem Instytutu
  - Instrukcja producenta

### SPOSÓB POBRANIA MATERIAŁU DO BADAŃ GENETYCZNYCH


#### UWAGA !

Nie jeść i nie pić godzinę przed pobraniem materiału do badań oraz przed pobraniem przepłukać usta świeżą wodą (np. wodą mineralną).


1. Rozpakować foliowy zestaw, wyjąć ze środka rękawiczki i założyć.
2. Wyjąć pałeczkę z opakowania foliowego oraz z rurki chwytając za żółty korek.

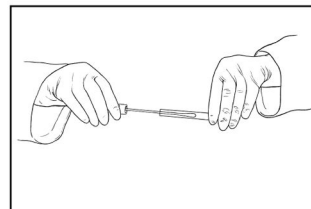

3. Trzymając za żółty korek zebrać materiał z wewnętrznej strony policzka w miejscu połączenia dziąsła z policzkiem, mocno przyciskając pałeczkę do policzka, wykonując ruchy okrężne oraz w górę i w dół (około 1 minuty).

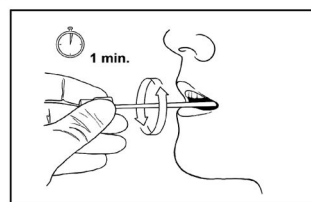


4. Zamknąć pałeczkę nasadzając rurkę i umieścić w kopercie papierowo-foliowej ze środkiem pochłaniającym wilgoć.
5. Zakleić zieloną kopertę papierowo-foliową.

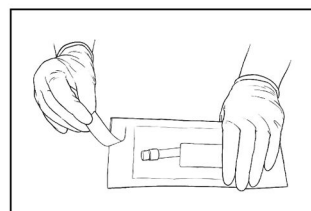

6. Zaznaczyć krzyżykiem osobę od której pobrano materiał na odwrocie zielonej koperty papierowo-foliowej.

7. Pakiety umieścić w kopercie depozytowej, oderwać i zachować jeden odcinek kontrolny koperty, zakleić kopertę depozytową.

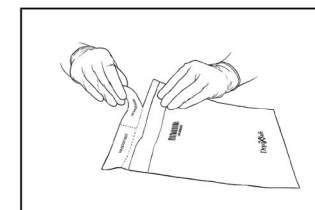

Kopertę depozytową umieścić w kopercie zwrotnej i wysłać jako "PRIORYTET"

#### UWAGA !

- Nie umieszczać pałeczki z rurką w opakowaniu foliowym po pałeczce!!!
- Należy zwrócić szczególną uwagę, by nie zamienić pałeczek.
- Chronić główkę koperty przed obcym materiałem biologicznym (np. kichnięcie, ślina, pot, itp.) W przypadku zabrudzenia należy ponownie pobrać materiał na nowy zestaw.

**W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt  
tel. 0605 612 886; [www.genetico.pl](http://www.genetico.pl)**